

Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll fjäderfä – frigående värphöns i olika typer av system

Ett par sockprover och två tygsvabbar med träck eller två par sockprover

Provtagningsinstruktionen ska användas för provtagning av flockar med frigående värphöns inom den obligatoriska salmonellakontrollen för fjäderfä. Provtagningsinstruktionen hanterar två olika varianter av system

- A. Värphönsflockar med flervåningssystem eller andra system med frigående höns, där största delen av träcket avlägsnats från stallet med ex. gödselmattor. Det här är det vanligaste systemet i Sverige – så är det sannolikt denna metod du ska använda även om du inte gjort det tidigare.
- B. Värphönsflockar där största delen av träcket hamnar i bädden.

Provtagningen sker för de olika kategorierna med:

A – Ett par sockprover och två tygsvabbar med träck

B – Två par sockprover

Antal prover som anges är per flock/djurutrymme.

DET HÄR BÖR FINNAS MED I UTSKICKET:

A: Ett par sockprover och två tygsvabbar med träck

- 1 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
- 1 par stövskydd + 2 par skyddshandskar i en plastpåse
- 2 tygsvabbar för träckprov i en plastpåse
- 1 följesedel och provtagningsanvisning
- 2 plastpåsar + 2 påsklämmor
- 1 returkuvert

B: Två par sockprover

- 2 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
- 1 par stövskydd + 1 par skyddshandskar i en plastpåse
- 1 följesedel och provtagningsanvisning
- 2 plastpåsar + 2 påsklämmor
- 1 returkuvert

INNAN DU BÖRJAR:

- Läs igenom hela instruktionen.
- I provtagningsutrustningen finns ett par (Provtagning kategori A) respektive två par (Provtagning kategori B) tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av golvet i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer. Sockorna och tygsvabbarna fuktas i den påse de ligger, med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat).
- Märk proverna; detta är särskilt viktigt om prover från fler flockar skickas in samtidigt.
- Byt om, tvätta händerna och sätt på dig skoskydd samt skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig det första paret sockor på fötterna. Vid användande av hygieniseringspulver som ex Staldren – undvik att i möjligaste mån få detta på skoskydd och sockor. Sätt då på dig skoskydden först när du kommer in i flocken.
- OBS Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet inte ska rengöras eller ströas innan provtagning. Var noga med att proverna bara ska representera djurutrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

KATEGORI A – PROVTAGNING MED ETT PAR SOCKPROVER OCH TVÅ TYGSVABBAR MED TRÄCK

- Se till att utgödslingen är nyligen körd.
- Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
- Dela in stallet (yta inomhus) i tre delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på.
- Gå runt i hela stallytan, dvs stallets hela längd i alla gångar, så att provet representerar hela stallytan. Vrid tubgasen 90° runt foten efter 1/3 och 2/3 av stallytan (totalt två gånger) tills hela ytan är provtagen. Ta av sockorna när du rör dig utanför djurutrymmet.
- I samband med att du går runt ska du ta träckprover med tygsvabbarna. Svabba en så stor yta som möjligt på alla tillgängliga ändar av gödselbanden. De två svabbarna ska vara täckta på båda sidorna med träck från band och skrapor eller bandrensare. Om det inte går att komma åt gödselbandet eller om det inte finns något gödselband så ska andra områden där träck samlas svabbas.
- Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna och tygsvabbarna i plastpåsen.
 - **Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.**
 - Skicka enbart in tygsvabbarna och tubgasbitarna INTE SKOSKYDDEN.
 - Förslut påsen väl med påsklämma.
 - Lagg sedan påsen med tygsvabbarna och tubgasbitarna i påse nr 2 och förslut med påsklämma.

KATEGORI B – PROVTAGNING MED TVÅ PAR SOCKPROVER

- Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
- Dela in stallet (yta inomhus) i två delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på, använd ett par sockor i varje del.
- Gå runt, ca 100 – 200 steg, så att provet representerar hela ytan i den delen. Vrid tubgasen 90° runt foten vart 25-50 steg (tre gånger per del) tills hela delen är provtagen. Ta av sockorna när du rör dig utanför djurutrymmet.
- Byt sockor och upprepa proceduren i den andra delen. Alla delar av stallet som flokken haft tillgång till ska provtas. När alla sockorna är använda skall hela utrymmet ha provtagits.
- Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna i plastpåsen.
 - **Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.**
 - Skicka in enbart tubgasbitarna INTE SKOSKYDDEN.
 - Förslut påsen väl med påsklämman.
 - Lagg sedan påsen med tubgasbitarna i påse nr 2 och förslut med påsklämma.