

PAR Provtagningsanvisning: träckprov kameldjur

TRÄCKPROV KAMELDJUR

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA.

Det rekommenderas att flera djur i flokken provtas vår och höst. Helst undersöks samtliga djur individuellt. Annars provtas utvalda djur, t ex yngre som oftare bär på fler parasiter än äldre. Om samlingsanalys önskas, skickas individuella prov tillsammans med en remiss där det tydligt framgår vilka prov som ska analyseras som en samlingsanalys, max 3 individer per samlingsanalys.

För undersökning av endast mag- och tarmparasiter samt lilla leverflundran behövs en knapp 1 deciliter träck. Om även odling för stor löpmagsmask önskas behövs ytterligare minst 3 matskedar. Träckprovet förpackas lämpligen i dubbla plastpåsar som försluts och märks med namn eller liknande. Ifall avföringen är lös läggs något absorberande material mellan påsarna. Prov läggs sedan i ett vadderat kuvert eller paket tillsammans med remiss.