

## MIK/BKT Provtagningsinstruktion miljöprover vid mastitproblematik

---

### Provtagning av strömedel vid mastitproblematik

#### UTFÖRANDE

##### *För strö eller ströbädd*

- Ta en 2-liters påse och vräng den över handen. Plocka representativt strö från flera olika delar av ströbädd eller strölager
- Förslut påsen
- Märk påsen med datum, SE-nummer och var i ströbädden/strölagret provet är taget
- Fyll i remiss och ange tydligt vilken frågeställning eller specifika bakterier som provet ska analyseras för. Laboratoriet väljer odlingsplattor utifrån frågeställning.

##### *För mjölkkningsutrustning, vattenkoppar mm*

- Ta en kompress fuktad med vatten eller natriumklorid och torka av de delar av utrustningen som ska provtas. Alternativt ta en culturette och provta önskade ytor.
- Kompresser läggs i en plastpåse som försluts
- Märk påsen/culturetten med datum, SE-nummer och var provet är taget
- Fyll i remiss och ange tydligt vilken frågeställning eller specifika bakterier som provet ska analyseras för. Laboratoriet väljer odlingsplattor utifrån frågeställning.

##### *För juverdukar*

- Sänd in hela eller delar av juverdukar i plastpåse märkt med datum och SE-nummer
- Fyll i remiss och ange tydligt vilken frågeställning eller specifika bakterier som provet ska analyseras för. Laboratoriet väljer odlingsplattor utifrån frågeställning.

#### INSÄNDNING AV PROV

Lägg prov och remiss i ett vadderat förfrankerat SVA-kuvert och skicka med posten.

#### **Skicka prov till**

SVA

Avdelningen för mikrobiologi

751 89 UPPSALA

**Vill du veta mer eller har du andra frågor om mastitpatogener?  
Tveka inte att ringa eller e-posta oss!**

Charlotta Fasth, Laboratorieveterinär  
018-67 42 61, charlotta.fasth@sva.se

Susanne André, sektionschef  
018- 67 42 71, susanne.andre@sva.se