

POV/VLT Så här förpackar du ett CWD-prov Hjärnstam & Lymfknotor

PACKA RÄTT FÖR EN SÄKRARE HANTERING OCH SNABBARE SVAR.

Här följer information hur du hanterar och packar prov, som består av hjärnstam och käklymfknotor från hjortdjur, för CWD-övervakning. Prover för CWD-undersökning kan skickas färska eller frysta.

För att skicka in hjärnstam och lymfknotor för CWD undersökning behöver du förutom det material du har fått från oss;

- Häftapparat eller kraftig tejp

1



Se till att locken till provrören är tillskruvade. Lägg provrören i en av plastpåsarerna tillsammans med absorberande material.

Knyt ihop påsen väl.

Har du provtagit fler djur, lägg prover från olika djur i separata påsar.

2



Lägg den ifyllda remissen i den andra plastpåsen.

3



Lägg remiss och prover i det vadderade kuvertet.

4



Förslut kuvertet väl med häftklamren och/eller kraftig tejp. Posta i en vanlig postlåda eller lämna in på ett PostNord Företagscenter.

FRÅGOR

Kontakta SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, för diskussion om eventuell provtagning och hur kadavret ska tas om hand. Den som omhändertar djurkroppar med misstänkt sjukdom eller smitta rekommenderas att bära skyddshandskar.

Telefon 018-67 40 00, e-post vilt@sva.se. Det går också bra att använda vår mobilvänliga webbsida för rapportering av viltsjukdomar, <https://rapporteravilt.sva.se>.