

## BKT, Provtagningsinstruktion, mykoplasma hos djur

---

### Provtagningsinstruktion för mykoplasma hos djur

#### **MYKOPLASMAPROVTAGNING MED SVABB**

Proverna tas med E-swab som kan beställas i vår webbutik - <http://www.sva.se/analyser-och-produkter/webbutik> eller genom att ringa 018-67 43 00.

#### **KROPPSVÄTSKOR**

Ledvätska, mjölk, trachealsköljprov etc skickas in i sterilt rör.

#### **ORGANPROVER**

Skär ut en bit av ett färskt organ t.ex lunga och förpacka väl i dubbla plastpåsar eller en plastburk.

Skriv alltid på remissen att frågeställningen är mykoplasma eftersom proverna kräver speciell hantering. Ange även på remissen om någon speciell mykoplasma efterfrågas.

Prover och remiss skickas i ett vadderat kuvert till SVA, Avdelningen för mikrobiologi, 751 89 Uppsala.